



REF 093 991

# SCAN SPRAY PREMIUM

Stand:061117

**Inhalt: e 200 ml**

**Art der Anwendung:**

Scan Spray Premium ist ein Pulverspray zur Verbesserung der optischen Eigenschaften von Modellen bei der Aufnahme per Kamera oder Scanner bei der CAD/CAM-Anwendung. Geeignet für den extraoralen Bereich bei der Aufnahme von präparierten Modellen.

**Hinweise zur Anwendung:**

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Aus einer Entfernung von ca. 5-10cm die betreffende Oberfläche dünn einsprühen.

**Sicherheitshinweise:**

**H 222 - H 229** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: **kann bei Erwärmung bersten**. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

**3**

**Gefahr**



LOT Siehe Aufdruck

**MW Dental**

Müller & Weygandt GmbH • Reichardsweide 40  
D-63654 Büdingen • Tel.: +49 (0)6042 – 88 00 88