

Inhalt/Content:

20 kg



Stand:030423

# SIMPLEE®

All you need. No more. But no less.

## SIMPLE ART

Synthetischer Klasse III Artikulationsgips (formaldehydfrei).  
Sehr standfest mit erhöhter Klebekraft.

Ein Wagsacken des Modells bei der Artikulation bleibt aus.

© Synthetic Class III articulating plaster (formaldehyde-free).  
Very stable with increased adhesive strength.

This prevents the model from sagging during articulation.



**REF 700 917 extraweiß/extra white**

UFI: AP8K-51 G6-JE9U-PEM2

Anmischverhältnis/Mixing ratio: 100 g: 30 ml dest. Wasser/  
Distilled water

Anmischzeiten/Mixing times: manuell/Manually 50 Sek./sec.  
Vakuum/Vacuum 30 Sek./sec.

Verarbeitungszeit/Processing time: 2 - 3 min.

Abbindezeit/Setting time: 3 - 4 min.

Enformbarkeit/Demouldability: ca. 15 min.

Druckfestigkeit nach/Compression strength after 1h: 20 MPa

Expansion nach/after 2h: 0,06%

Expansion nach/after 24h: 0,06%

 Lifco Dental AB; Verkärestaregatan 1 · 745 39 Enköping, Sweden